

～ JPEG等のデジタルデータをDICOM画像に変換～



File Gateway


パクシス
ファイルゲートウェイ

心電図装置等からの自動取り込みも可能

デジタルカメラなどの画像

スキャナで
デジタル化した画像

一般的な
JPEG, BITMAPファイル

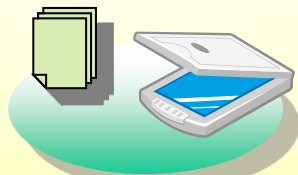

画像をFileGatewayに取り込む

ファイル名	サイズ	種類	更新日時
ECG_sample.jpg	384 KB	JPEG イメ...	2009/03/31 18:5

① JPEG画像ファイルなどをドラッグ&ドロップ(複数枚可)


② 患者情報、検査情報を入力(患者IDは必須)

③ 送信ボタンを押す

患者情報		検査情報		検査	
患者ID:	000001	受付番号:		シリーズ番号:	1
患者名(漢字):	鈴木 太郎	検査ID:		モダリティ:	ECG
患者名(カナ):	スズキ タロウ	検査日:	2009/03/31	依頼医師:	
患者名(ローマ字):	SUZUKI TAROU	検査時間:	18:52:34	照会医師:	
生年月日:	1980/05/11	検査部位:		実施医師:	
性別:	M	依頼部門:		検査コメント:	

送信
クリア

DICOM画像をサーバに送信

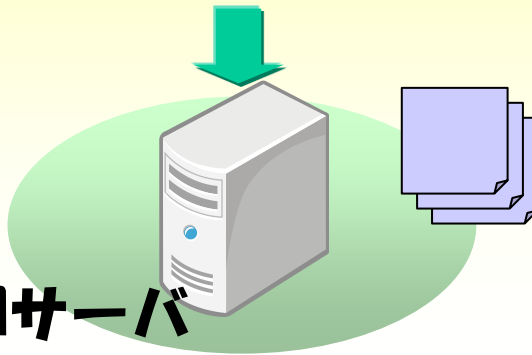

DICOMサーバ